

**Siliconen wondcontactlaag voor een  
atraumatische verwijdering en wondbescherming****PRODUCTOMSCHRIJVING**

Biatain Contact® is een steriele, biocompatibele, niet-klevende siliconen wondcontactlaag voor atraumatische verwijdering en wondbescherming.

Het gemakkelijk aan te brengen product wordt op zijn plaats gehouden door en moet worden gebruikt in combinatie met een secundair absorberend verband, dat moet worden gefixeerd.

Het bestaat uit een geperforeerde transparante polyurethaan steunfolie en een laag siliconengel die direct met de wond in contact komt. Dankzij de biocompatibele samenstelling, de openingen en de zich perfect naar de wond vormende structuur kunnen vocht en wondvocht vanuit de wond naar het secundaire verband worden afgevoerd. Deze eigenschappen maken het product ook zeer ademend en doorlaatbaar voor wondvocht, wat het risico op stagnatie en weefselverwaking verlaagt.

De structuur beperkt het risico op celingroei in de poriën en op het oppervlak van het verband, en bevordert de vorming van granulatieweefsel op het wondoppervlak.

De vervormbaarheid en hoge transparantie zorgen ervoor dat het genezingsproces gedurende het gebruik kan worden geobserveerd.

Het product beschermt het wondoppervlak ook tijdens het verwisselen van het secundaire verband, omdat het voorkomt dat het verband aan nieuw gevormd weefsel vastplakt.

Het minimaliseert de kans op trauma aan zowel de wond als de perilaesionale huid en minimaliseert zo het risico op pijn bij het verwijderen.

Het voorkomt dat het secundaire verband aan de wond vastplakt zodat bij het verwijderen geen resten achterblijven.

**INDICATIES VOOR GEBRUIK**

Biatain Contact® is een contactverband geïndiceerd voor de behandeling van ulcera en chronische of acute laesies die in meer of mindere mate wondvocht afgeven, dat samen met een secundair absorberend verband moet worden aangebracht.

Het kan ook als beschermklaag op geen vocht afgevend wonden of op tere huid worden gebruikt, na passende fixatie met geschikt verband.

Voor specifieke medische indicaties kan het ook in combinatie met compressiezachtels worden gebruikt.

**WIJZE VAN GEBRUIK**

Biatain Contact® heeft als voordeel dat het tijdens het gebruik op zijn plaats blijft en na gebruik gemakkelijk kan worden verwijderd.

Volg de onderstaande procedure:

Reinig, desinfecteer en behandel de laesie en de huid volgens het standaardprotocol.

Kies een maat van Biatain Contact® die groot genoeg is om de gehele laesie en de perilaesionale huid te bedekken. Zo nodig kan Biatain Contact® met een steriele schaar tot de meest geschikte maat worden bijgeknipt.

- 1 Verwijder de eerste beschermstrook, zodat de siliconenlaag bloot komt te liggen.
- 2 Breng de siliconenlaag van Biatain Contact® voorzichtig aan terwijl u de tweede beschermstrook verwijdert en zorg dat u het gebied van de laesie volledig bedekt.
- 3 Breng een steriel absorberend verband op Biatain Contact® aan en zet dit vast.


**FREQUENTIE VAN VERBANDWISSELING**

De frequentie waarmee het verband moet worden verwisseld, is afhankelijk van de toestand van de wond en moet in overeenstemming zijn met de huidige richtlijnen voor Good Clinical Practice. Observeer de wond. Roep in geval van complicaties of infecties medische hulp in.

**CONTRA-INDICATIES**


Gebruik Biatain Contact® niet bij patiënten met een bekende gevoeligheid voor silicone.

**VOORZORGSMAATREGELEN EN SYMBOLEN**

 Niet opnieuw gebruiken (voor eenmalig gebruik). Hergebruik kan de prestaties beïnvloeden en kruisbesmetting veroorzaken.

 **STERILE EO** Steriel. Gesteriliseerd met ethyleenoxide.

 Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.

 Uit de buurt van zonlicht houden.

 Uiterste gebruiksdatum.

 Droog houden.

 **REF** Catalogusnummer.

 **Fabrikant**