

PolyMem®

- REF 5022 - 1.8" X 1.8" (4.7cm x 4.7cm)**
- REF 5033 - 3" x 3" (8cm x 8cm)**
- REF 5044 - 4" x 4" (10cm x 10cm)**
- REF 5055 - 5" x 5" (13cm x 13cm)**
- REF 5077 - 6.5" x 7.5" (17cm x 19cm)**
- REF 5124 - 4" x 12.5" (10cm x 32cm)**
- REF 5244 - 4" x 24" (10cm x 61cm)**
- REF 5824 - 8" x 24" (20cm x 20cm)**
- REF 5035 - MAX 3" x 3" (7.6 cm x 7.6cm)**
- REF 5045 - MAX 4.5" x 4.5" (11cm x 11cm)**
- REF 5088 - MAX 8" x 8" (20cm x 20cm)**

Do not use if pouch has been damaged or opened. Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd of geopend is. Mā ike kuainga, hui i poutū e kōwhiri te hōuā, he rā ike ike. Anā, he rā ike ike he rā ike ike. Ei saa kāhā, hui i poutū e kōwhiri te hōuā, he rā ike ike. Anā, he rā ike ike he rā ike ike. Nāi utiā se e ike ike he rā ike ike e kōwhiri te hōuā. Non utilizzare se la busta è stata aperta o danneggiata. Nāi utiā se e ike ike he rā ike ike e kōwhiri te hōuā. Do not use if pouch has been damaged or opened. Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd of geopend is. Mā ike kuainga, hui i poutū e kōwhiri te hōuā, he rā ike ike. Anā, he rā ike ike he rā ike ike. Ei saa kāhā, hui i poutū e kōwhiri te hōuā, he rā ike ike. Anā, he rā ike ike he rā ike ike. Nāi utiā se e ike ike he rā ike ike e kōwhiri te hōuā. Non utilizzare se la busta è stata aperta o danneggiata. Nāi utiā se e ike ike he rā ike ike e kōwhiri te hōuā.	Keep away from sunlight and heat. Ut de hāi sun zāhāli e wāhā hōuā. Vor Sonnenlicht und Hitze schützen. Mā ike kuainga i dika te hōuā e wāhā hōuā. Hāi hōuā hāi hōuā e wāhā hōuā. Sāhāhāhā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā. Nāi utiā se e ike ike he rā ike ike e kōwhiri te hōuā. Non utilizzare se la busta è stata aperta o danneggiata. Nāi utiā se e ike ike he rā ike ike e kōwhiri te hōuā. Do not use if pouch has been damaged or opened. Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd of geopend is. Mā ike kuainga, hui i poutū e kōwhiri te hōuā, he rā ike ike. Anā, he rā ike ike he rā ike ike. Ei saa kāhā, hui i poutū e kōwhiri te hōuā, he rā ike ike. Anā, he rā ike ike he rā ike ike. Nāi utiā se e ike ike he rā ike ike e kōwhiri te hōuā. Non utilizzare se la busta è stata aperta o danneggiata. Nāi utiā se e ike ike he rā ike ike e kōwhiri te hōuā.	Single use. Do not re-use. Kāhāhāhā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā. Zāi E mōhōhōhō. Nāi utiā se e ike ike he rā ike ike. Eingangsring. Mā ike kuainga. Tāi e mōhōhōhō. Kāhāhāhā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā. Tāi kōwhiri hōuā. Ei saa kāhā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā. Tāi e mōhōhōhō. Kāhāhāhā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā. Tāi e mōhōhōhō. Kāhāhāhā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā. Tāi e mōhōhōhō. Kāhāhāhā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā hōuā.
--	---	---



FERRIS MFG. CORP.
5133 Northcote Parkway, Fort Worth, TX 76106-1822 U.S.A.
Toll Free U.S.A.: 800-765-9636 • International: +1 817-900-1301
www.polymem.com • info@polymem.com
© 2015 Ferris Mfg. Corp. • ® or ™ indicate trademark



FMC-5930 REV05.015

PolyMem® niet-zelfklevende pleister of rolverband *Het betrouwbare multifunctionele verband.*

BESCHRIJVING

PolyMem polymeermembraanverbanden zijn gemaakt van vocht-liefhebbende polyurethaan matrix dat (1) een veilige wondreiniger, (2) vocht inbrengende glycerine en (3) super absorberende stoffen bevat. Verbanden hebben een dunne polyurethane buitenzijde die ademt en besmetting buiten houdt. Verbanden kunnen worden gebruikt als primaire, als secundaire of als gecombineerde primaire- en secundaire verbanden. PolyMem MAX™ verbanden hebben hetzelfde polymeermembraan als PolyMem verbanden, maar MAX is dikker en heeft een hogere MVTR (vochtdoorlaatbaarheid) om meer vocht aan te kunnen.

Geneesmiddelvrije PolyMem verbanden helpen om: effectief wonden te verzorgen en te genezen vocht te absorberen en een vochtige genezende omgeving te creëren

- aanhoudende- en chirurgische wondpijn te minimaliseren en te verlichten
- zwellingen, verwondingen, en de verspreiding van ontstekingen in omliggende onbeschadigde weefsels, te verminderen

AANWIJZINGEN

Als vrij verkrijgbaar hulpmiddel, voor de behandeling van kleine verwondingen, zoals:
• Schaafwonden • Scheurtjes • Snijwonden • Brandwonden

Onder de begeleiding van een zorgverlener, voor de verzorging van ernstige wonden, zoals de meeste gedeeltelijke- en diepe wonden, waaronder:
• Decubitus (fases I-IV) • Veneuze aderlijke zweren • Acute wonden • Ulcus cruris • Donor- en transplantatieplekken

- Huidscheuringen • Diabetische zweren
- Dermatologische stoornissen • 1ste en 2de graads brandwonden • Chirurgische wonden
- Ulceratie van bloedvaten

VOORZORGSMATREGELEN


- Alleen voor uitwendig gebruik • PolyMem verbanden gaan niet goed samen met oxidatiemiddelen (waterstofperoxide of hypochlorietoplossingen) • Bepaal of het verband verwijderd moet worden vóór het uitvoeren van procedures voor beeldvorming • Vermijd contact met elektroden of geleidende gels • Lokale behandelingen zijn niet aanbevelen in combinatie met PolyMem verbanden • Let goed op symptomen van infectie of maceratie • Gebruik de verbanden niet en stop met het gebruik ervan bij personen die tekenen van gevoeligheid, irritatie of allergie voor het verband of zijn materialen vertonen • Bestemd voor éénmalig gebruik bij één persoon. Niet hergebruiken. Hergebruik kan de werking van bestanddelen verminderen, besmetting verspreiden en de risico op infectie verhogen

PolyMem verbanden mogen gebruikt worden wanneer tekenen van infectie aanwezig zijn en als de geschikte medische behandeling die de oorzaak van de infectie behandelt, geïmplementeerd is.

Bewaar op kamertemperatuur ≤30°C (86°F). Afwijkingen zijn toegestaan ≤ 55°C (131°F) maar vermijd dit zoveel mogelijk.
Afvalverwijdering zoals gevaarlijk biologisch afval.
Afmetingen bij benadering.

AANWIJZINGEN **Eerste Toepassing**

Bereid de wond voor volgens het protocol of zoals voorgeschreven door een arts of andere clinicus van dienst.
Selecteer een verband met een pleistermembraan dat ¼" – 2" (0.6 – 5 cm) groter is dan de wond. Het verband moet ook alle ontstoken en beschadigde gebieden rondom de wond bedekken. Verbanden kunnen geknipt worden.
Wanneer het ene droge wond betreft, maak het verband een beetje vochtig voordat het wordt aangebracht.
Plaats de film laag naar buiten toe (zodat de opdruk zichtbaar is).
Maak verbanden vast, zoals met kleefband, een net, of gaas.
Maak een omtrek van de wond aan de buitenzijde van het verband om vast te stellen wanneer het verschoond moet worden.

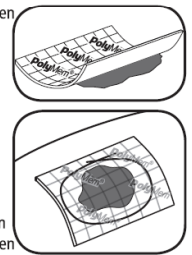

- Gebruik**
1. Een zeer sterke toename van wondvocht kan tijdens de eerste paar dagen worden waargenomen door vocht aantrekking. Dit is niet ongewoon en is een indicatie dat het verband werkt.
 2. Houd het verband droog en op zijn plaats tijdens het baden. Verschoon het verband indien het nat wordt.

Verschooning van het verband

1. Bij een exsuderende wond zal het wondvocht zichtbaar worden aan de buitenzijde. Verschoon voordat wondvocht de wondrand bereikt, indien naar goed gebruik nodig wordt geacht, of na maximaal de 7 dagen. Verschoon onmiddellijk indien het wondvocht de rand van het membraanverband bereikt.
2. Vaker verschoon kan nodig zijn vanwege een aangeslagen immuunsysteem, diabetes, infectie, hypergranulatie, gewekt weefsel of wanneer de

